


国内の小児における肺炎球菌莢膜血清型の疫学的検討（ニューモキャッチ） —純培養平板培地の提出方法—


『微生物学検査依頼書』をお送りいたします。
以下の手順に従って検体発送の準備をお願いいたします。

- ① 検査伝票（微生物学検査依頼書）に必須項目のご記入をお願いします。
- 登録 ID
 - 提出方法
 - 由来材料

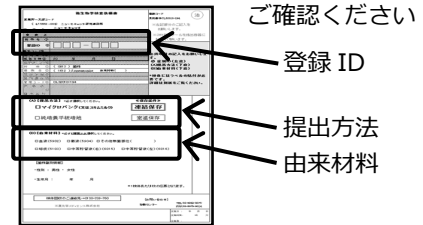


※ 1 検体あたり 1 枚の伝票が必要です。

- ② 検査伝票（微生物学検査依頼書）の 3 枚目に純培養平板培地提出用のラベルがあります。

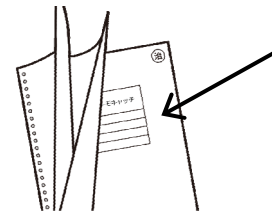

- ③ 3 枚目のラベルをはがして純培養平板培地の底にラベルを貼ってください。

※ 1 症例あたり複数の検体を提出する場合は、ラベルに由来材料を明記してください。

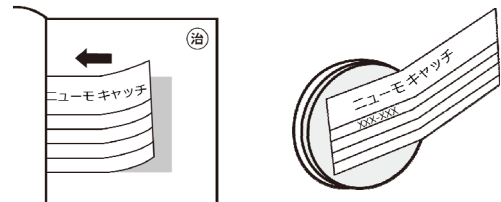


- ④ 回収まで、室温で保存をお願いします。

※ 室温以外の方法で検体を保存される場合は、検体回収のご予約電話時にお知らせください。

- ⑤ 菌株回収のご予約をお願いいたします。
三菱化学メディエンスの担当者が回収に伺いますので、以下 2 点を回収者にお渡しください。

1. 微生物学検査依頼書
2. 純培養平板培地

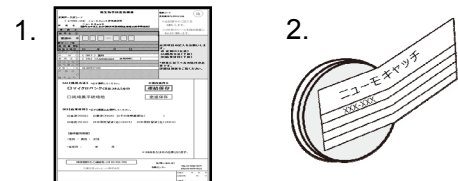

※ ご予約方法の詳細は検査キット内に同封しておりますので、そちらをご確認ください。

ご不明な点等ございましたら、ニューモキャッチ研究事務局までご連絡ください。
(TEL : 03-6228-4881 E-mail : info@pneumocatch.jp)